

Hopmooov

REF 6780002LOC

NOTICE UTILISATION -Chaise d'évacuation 3 roues

Permet une descente fluide



Design pliable et compact

Assise ergonomique

Utilisation intuitive

ATTENTION: la chaise est conçue pour le transport de personnes, elle ne doit pas être laissée sans surveillance. Une fois utilisée, elle peut basculer vers l'arrière et blesser l'occupant.
La chaise nécessite un minimum deux personnes pour être manipulée.




1. Retirer la chaise de l'emplacement de stockage et la placer sur le sol dans une position appropriée.



2. Tenez l'extension de la poignée et poussez le mécanisme de verrouillage rouge à l'arrière de l'assise du siège, déployez jusqu'à ce que la chaise se verrouille dans la bonne position.



3. Repliez l'extension de la poignée et insérez les goupilles de sécurité de chaque côté.

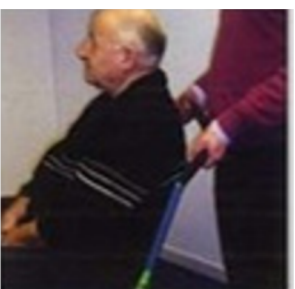

4. En utilisant une méthode appropriée, transférez un patient dans le fauteuil, placez les pieds de la personne sur le repose-pied si nécessaire. Attachez la ceinture de sécurité et montez en haut des escaliers.



5. Il est nécessaire d'être à deux personnes (une à l'avant et une à l'arrière) pour équilibrer la chaise. En avançant doucement vers la marche inférieure, vous permettrez ainsi aux trois roues rotatives de s'équilibrer. Abaissez la chaise et continuez à descendre chaque marche. Une fois au niveau du sol, déplacez-vous vers un lieu sûr.



NOTICE UTILISATION -Chaise d'évacuation 3 roues

REF 6780002LOC

hopmoov



03.74.09.81.70
www.hopmoov.com
contact@hopmoov.com

Rangement de la chaise:



1. Attachez la ceinture de sécurité, rabattez le repose-pieds et relevez les bras du fauteuil.



2. Retirez les goupillons de sécurité de chaque côté et repliez l'extension de la poignée.



3. Poussez le mécanisme de verrouillage rouge à l'arrière de l'assise du siège.



4. Rabattez la chaise en position de rangement et rangez-la.



NOTICE UTILISATION -Chaise d'évacuation 3 roues

REF 6780002LOC

hopmoov



03.74.09.81.70
www.hopmoov.com
contact@hopmoov.com