

Manuel d'utilisation

Chaise d'évacuation trois roues

Guide de déploiement, d'utilisation et de rangement. À conserver auprès de la chaise.

Réf. 6780002

2 personnes requises



Par courrier

1 rue Haarlem
59200 Tourcoing

Par téléphone

03 74 09 81 70
Du lundi au vendredi

Par e-mail

contact@hopmoov.com

Sur internet

www.hopmoov.com

Attention

La chaise est conçue pour le transport de personnes, elle ne doit pas être laissée sans surveillance. Une fois utilisée, elle peut basculer vers l'arrière et blesser l'occupant. La chaise nécessite un minimum deux personnes pour être manipulée.

Mode d'emploi



- 1 Retirer la chaise de l'emplacement de stockage et la placer sur le sol dans une position appropriée.




- 2 Tenez l'extension de la poignée et poussez le mécanisme de verrouillage rouge à l'arrière de l'assise du siège, déployez jusqu'à ce que la chaise se verrouille dans la bonne position.



- 3 Repliez l'extension de la poignée et insérez les goupilles de sécurité de chaque côté.



- 4 En utilisant une méthode appropriée, transférez un patient dans le fauteuil, placez les pieds de la personne sur le repose-pied si nécessaire. Attachez la ceinture de sécurité et montez en haut des escaliers.

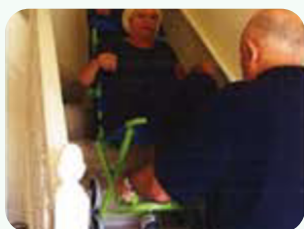

- 5 Il est nécessaire d'être à deux personnes (une à l'avant et une à l'arrière) pour équilibrer la chaise. En avançant doucement vers la marche inférieure, vous permettrez ainsi aux trois roues rotatives de s'équilibrer. Abaissez la chaise et continuez à descendre chaque marche. Une fois au niveau du sol, déplacez-vous vers un lieu sûr.

Rangement de la chaise



1

Attachez la ceinture de sécurité, rabattez le repose-pieds et relevez les bras du fauteuil.



2

Retirez les goupillons de sécurité de chaque côté et repliez l'extension de la poignée.



3

Poussez le mécanisme de verrouillage rouge à l'arrière de l'assise du siège.



4

Rabattez la chaise en position de rangement et rangez-la.

N'oubliez pas de toujours être courtois, prévenant et rassurant avec votre patient.

Une question sur votre matériel ?

03 74 09 81 70 • contact@hopmoov.com • www.hopmoov.com
1 rue Haarlem, 59200 Tourcoing